

TEUTO

TEUTO

QUALIDADE
TEUTO
CONFIANÇA

BIO SOAK®

SOLUÇÃO PARA LENTES DE CONTATO

GRÁTIS
120 mL
+ estojo para lentes

 **PRODUTO EUROPEU**
PRODUZIDO NA FINLÂNDIA

**CONFORTO
REFRESCANTE**

**ELIMINA
PROTEÍNAS**

LIMPA

DESINFETA

ENXÁGUA

CONSERVA

**CONTÉM AGENTE
DE LIMPEZA
BIOLÓGICO ESPECIAL**

**SOLUÇÃO MULTIAÇÃO PARA TODOS OS TIPOS
DE LENTES DE CONTATO GELATINOSAS
INCLUINDO SILICONE HIDROGEL.
AMIGO DA NATUREZA, BIODEGRADÁVEL**

480mL

Na compra de 360mL leve grátis 120mL

O QUE É ?

Bio Soak® é uma solução multiacção para todos os tipos de lentes de contato gelatinosas incluindo silicone hidrogel. É um produto importado, denominado "All-in-one", ou seja, contém agentes de limpeza para desinfecção, remoção de proteínas, conservante, lubrificante e clareador.

PARA QUE SERVE ?


Bio Soak® serve para limpar, desinfetar, remover proteínas, conservar, clarear e lubrificar qualquer tipo de lente de contato gelatinosa e/ou material de silicone hidrogel.

COMPOSIÇÃO

- EDTA.
- Biguanida.
- Detergente.
- Borato de sódio.
- Cloreto de sódio.

COMO AGE ?

Bio Soak® contém o surfactante que potencializa o processo de desinfecção das lentes de contato gelatinosas. É obtido biologicamente por fermentação, remove os depósitos de proteínas da superfície das lentes e diminui a tensão superficial das mesmas. Penetra na película gelatinosa e fragmenta os depósitos para que seja mais fácil a penetração do desinfetante para eliminação destes depósitos, que logo se dissolvem

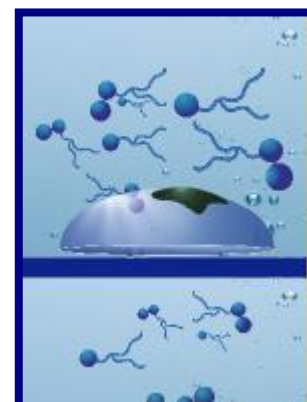

na solução. A eficácia de desinfecção de Bio Soak® é excelente, remove também proteínas e lipídios e não deixa resíduo químico, que podem causar irritação nos olhos e causar danos ao meio ambiente. A concentração do ingrediente ativo de Bio Soak® é baixa, mas sem comprometer sua excelente eficácia de desinfecção, evitando irritações aos olhos mais sensíveis, pois é biocompatível com o tecido ocular.

- EDTA: Agente quelante que potencializa a desinfecção e remove o depósito de cálcio através da formação do complexo EDTA-Ca.
- Biguanida: Atua como desinfetante e protege a solução contra contaminação microbológica.
- Detergente: É uma substância de limpeza biológica e biodegradável, que remove as impurezas da superfície da lente de contato e potencializa o processo de desinfecção.
- Borato de sódio: Estabiliza o PH da solução para um nível adequado para os olhos.
- Cloreto de sódio: Ajusta a osmolaridade da solução equivalente ao fluido lacrimal.

COMO USAR ?

- 1) Limpar, enxaguar e desinfetar as lentes de contatos todos os dias para evitar contaminação.
- 2) Lavar e enxugar as mãos antes de manusear as lentes de contato.
- 3) Retirar a lente do olho e colocar na palma da mão. Adicionar algumas gotas da solução Bio Soak® e esfregar cada lado da lente cuidadosamente com o dedo.
- 4) Enxaguar a lente cuidadosamente com Bio Soak® e colocá-la no respectivo estojo. Fazer a mesma operação com a outra lente.
- 5) Encher cada compartimento do estojo, com a solução limpa de Bio Soak®, até cobrir as lentes dentro do estojo. Fechar e

deixá-las no estojo durante a noite ou por um período mínimo de 4 horas.

- 6) Antes de seu uso novamente, enxágua-las bem cada lado para eliminar possíveis resíduos. Caso não venha fazer uso das lentes por duas semanas, refazer o processo de limpeza novamente.

APRESENTAÇÃO

Bio Soak[®] está sendo lançado no mercado na apresentação KIT contendo 1 fr. 360mL + 1 fr. 120mL + estojo p/ lente de contato. Bio Soak[®] é o produto que possui o maior volume dentre os Kits disponíveis no mercado.

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- **Multiação:** Limpa, Desinfeta, Enxágua, Conserva e Elimina proteínas.
- **Grátis:** Fr. 120mL + estojo p/ lente de contato.
- **Contém agente de limpeza biológico especial.**
- **Biodegradável, amigo da natureza!**
- **Produto Importado da Europa!**
- **Pode ser utilizado em todos os tipos de lentes de contato gelatinosas, incluindo silicone hidrogel.**
- **Volume Total de 480mL: Maior volume do mercado (KIT).**
- **Produto estéril.**

IMPORTÂNCIA DO USO DE BIO SOAK®

A importância da manutenção das lentes de contato é fundamental para se obter sucesso e manter a continuidade de seu uso, já que as complicações oculares devido à falta de obediência dos usuários em relação à manutenção e ao período de troca, em conjunto com a ausência de motivação estão entre as principais causas da desistência do paciente.

Bio Soak® proporciona uma maior vida útil para a lente, além de ser mais cômodo para os pacientes, facilitando a adesão em relação à conservação das lentes.

Bio Soak® veio para facilitar o paciente no cuidado das lentes de contato, uma vez que limpeza, enxágue e desinfecção são feitos com o mesmo produto.

PRECAUÇÕES

- Seguir as instruções do médico oftalmologista para garantir um correto uso das lentes de contato e sua higiene.
- Se tiver sintomas de irritação ocular, retirar as lentes limpas com Bio Soak®, e consultar o oftalmologista.
- Retirar o anel de segurança do frasco de Bio Soak® antes de usar pela primeira vez.
- Não tocar com o bico do frasco em qualquer tipo de superfície para evitar contaminação da solução em seu interior.
- Utilizar sempre a solução contida no frasco. Não se deve reutilizar solução já usada em outra assepsia.
- Tapar o frasco após a utilização da solução.
- Não misturar a solução Bio Soak® com outras soluções.
- Não utilizar nenhuma medicação junto com a solução Bio Soak® sem recomendação e supervisão médica.
- Descartar a solução após 04 (quatro) meses de abertura do frasco.

- Bio Soak® não está indicado para limpeza de lentes gás permeáveis (rígida).
- Não há contra-indicações para Bio Soak® na limpeza e desinfecção de lentes gelatinosas, por ser biocompatível com o tecido ocular e de altíssima qualidade higiênica.